



Kartuşun takılması

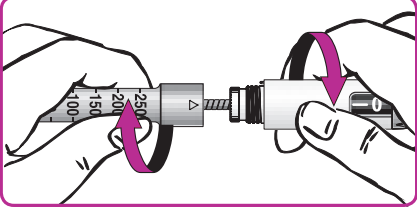


Lütfen önce insülinin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

- A** Pen yuvasındaki insülin kartuşunu sökünüz.
Varsa boş insülin kartuşunu çıkartınız.

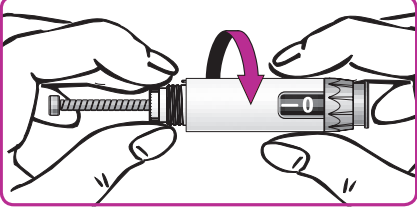


- B** Vida çubuğunu komple başlangıç konumuna getiriniz.

- ▶ Vida çubuğunun ucundaki halkayı sıkıca tutup yuvayı sonuna kadar geri çeviriniz.
- ▶ Vida çubuğunu geri itmeyi **DENEMEYİNİZ**.

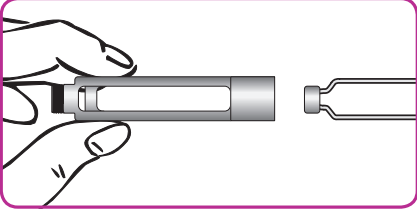


- C** Yeni kartuşu takınız.

- ▶ Doğru insülini kullandığınıza emin olup, kartuşu takınız.

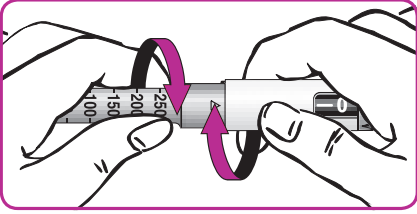

- D** Kartuşu yeniden pen yuvasına takınız.

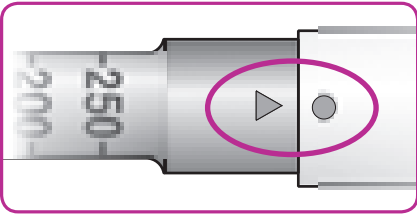

İşaretlerin yan yana gelmeleri gerekir. aretlerin yan yana gelmeleri gerekir.

Böyle değilse A adımından tekrar başlayınız.

Kartuşu tam otutturamadığınız durumda,

- ▶ kartuşun doğru takılı olup olmadığını ve
- ▶ vida çubuğunun komple geriye çevrilip çevrilmediğini kontrol ediniz.

ŞAYET Pen ile ilgili başka sorunlarınız varsa, önce iğneyi değiştirmeyi ve güvenlik testini tekrarlamayı deneyiniz.

TactiPen® sadece kişisel kullanım için tasarlanmıştır.

Kartuşların saklanması ve kullanımı ile ilgili bilgileri insülin kartuşlarının prospektüslerinde bulabilirsiniz.


TactiPen® 'inizin kaybolması veya hasar görmesi halinde insülin iğnesi yapabilmek için her zaman bir alternatifi hazır bulundurunuz.

Her enjeksiyon için yeni bir iğne kullanınız.

İnsülin enjeksiyonu

ÖNEMLİ: İnsülin süspansiyonunu çalkalayın!


1 ► İğneyi takın

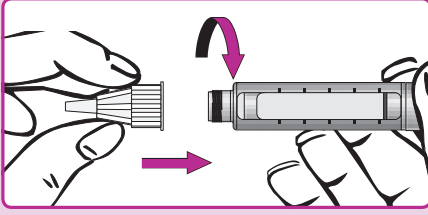

Lütfen önce insülinin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

- A** İğneyi düz yerleştiriniz.


2 ► Güvenlik testinin yapılması

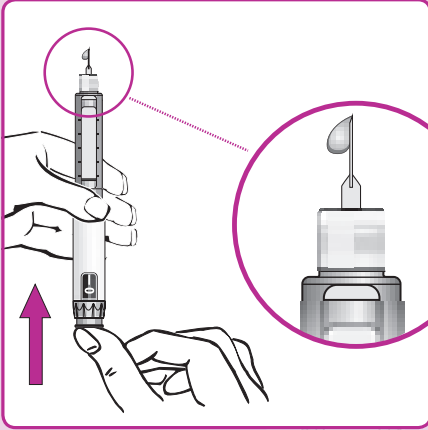

Her iğneden önce hava kabarcıklarını gidermek ve pen ile iğnenin gereği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir güvenlik testi yapınız.

- A** 2 birimlik bir doz ayarlayıp iğnenin koruma kapağını çıkarınız.
- B** Peni iğnesi yukarı gelecek biçimde tutup enjeksiyon düğmesine sonuna kadar bastırınız.
- C** İğnenin ucundan insülin çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz.
- İğnenin ucundan insülin çıkmadığı takdirde, insülin gelene kadar testi tekrarlayınız.
 - Üç kez yapılan güvenlik testine rağmen insülin çıkmayacak olursa, iğneyi değiştirip yeniden deneyiniz.
 - Hala insülin çıkmayacak olursa, kartuşun doğru takıldığından emin olup işlemi yeniden deneyiniz.
 - Buna rağmen insülin çıkmayacak olursa, kartuşu değiştirip baştan başlayınız.

3 ► Doz ayarı

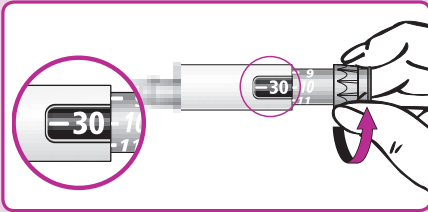


- A** Enjeksiyon düğmesini çevirip dozu ayarlayınız.

Gösterilen örnekte 30 birimlik bir doz seçilmiştir.

Sizin kullanacağınız doz bundan farklı olabilir.


İstenen dozu **AYARLAYAMAZSANIZ**, kartuşta yeterince insülin olup olmadığını kontrol ediniz.

4 ► Doz enjeksiyonu

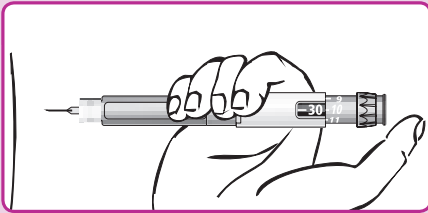


Size tıbbi personel tarafından gösterilen enjeksiyon tekniğini uygulayınız.

- A** İğneyi batırınız

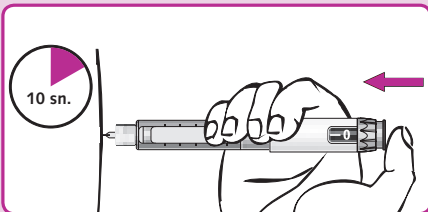

- B** Enjeksiyon kafasını tamamen bastırınız.
Doz penceresinde gösterilen rakam "0" a gelir.
- C** Enjeksiyon düğmesini tamamen basılı tutunuz.
İğneyi çıkartmadan önce 10'a kadar yavaş sayınız.

5 ► İğneyi çıkartma

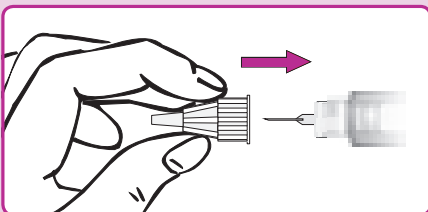

- A** Dış iğne koruma kapağını yeniden iğneye takıp bunun yardımı ile iğneyi penden çıkartınız.
- B** İğneyi güvenli bir biçimde imha ediniz (örneğin delinmeyecek bir kutuda).
- C** Penin kapağını yeniden pene takınız.