

Kurzbedienungsanleitung für SoloStar®-Insulinpens

Ihr Arzt hat Ihnen Mahlzeiteninsuline von Sanofi verordnet. Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation, die jeder Packung eines schnellwirksamen Insulins im SoloStar®-Fertigen beiliegt.

Nur mit geeigneten Nadeln von Becton Dickinson and Company (BD), Ypsomed, Artsana oder Owen Mumford verwenden. Fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Ihr medizinisches Fachpersonal, welche Nadeln geeignet sind.

i

1

1 Stunde
vor erster
Anwendung




Das Insulin eine Stunde vor der ersten Injektion aus dem Kühlschrank nehmen.

2




Hände waschen und Injektionsstelle reinigen.
Bezeichnung des Insulins und Verfallsdatum prüfen.

3

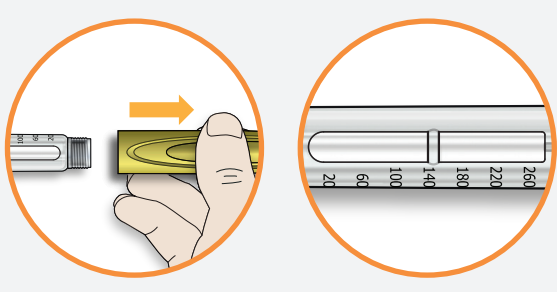


Penkappe entfernen und prüfen, ob die Lösung klar ist.

4

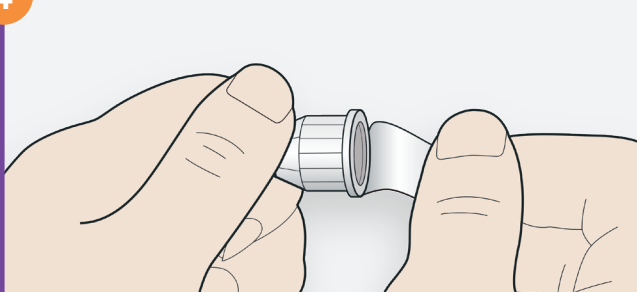


Schutzfolie von Nadelkappe entfernen.

5

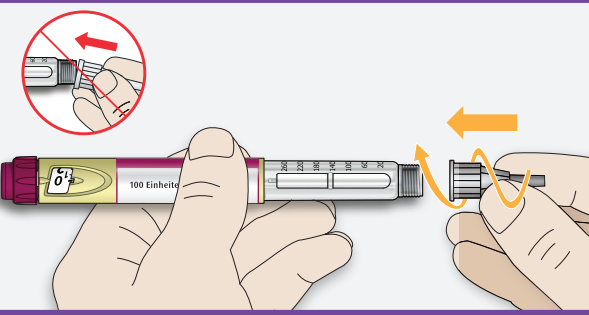


Nadel gerade auf den Pen schrauben.

6

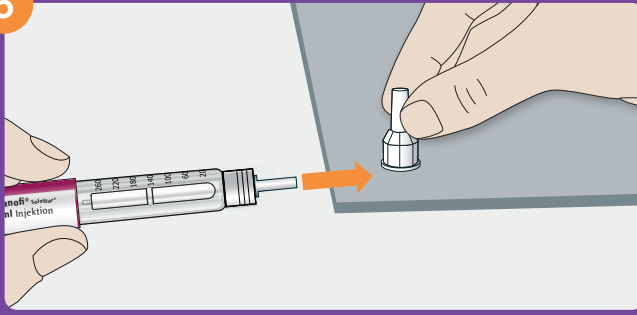

Äußere Nadelkappe abziehen und aufbewahren.

7

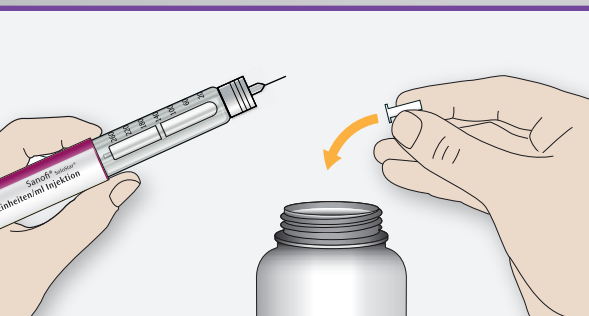


Innere Nadelkappe abziehen und entsorgen.

8




Zum Sicherheitstest Dosierung „2 Einheiten“ einstellen.

9

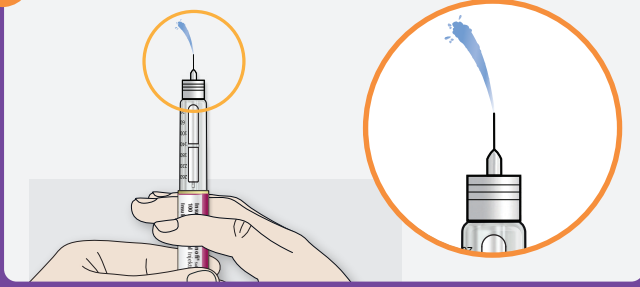


Injektionsknopf drücken, bis Insulin austritt.

10

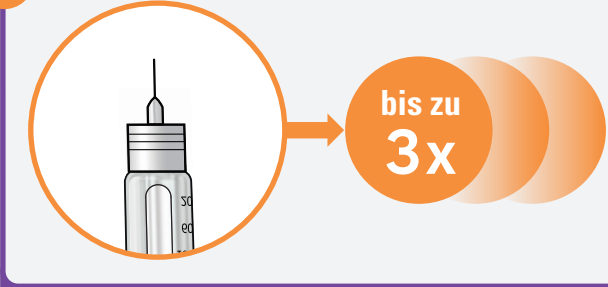


Falls kein Insulin austritt, Sicherheitstest bis zu dreimal wiederholen, bis Insulin austritt.

11

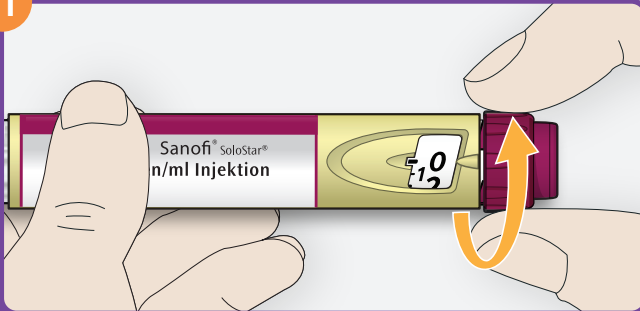


Dosiererring drehen, bis gewünschte Dosis angezeigt wird.

12

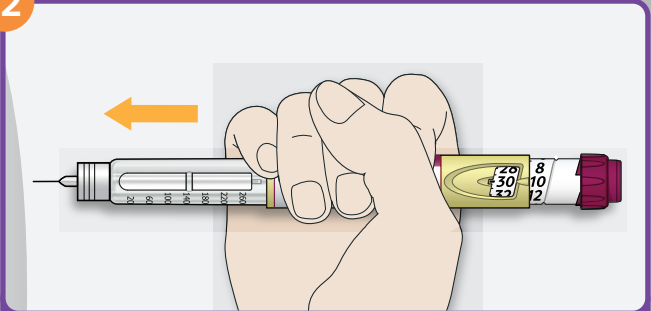


Pen im 90-Grad-Winkel in Haut stechen.

13

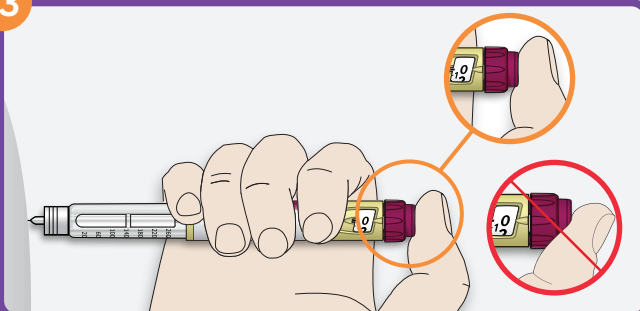


Daumen gerade auf Injektionsknopf legen und dann drücken.

14

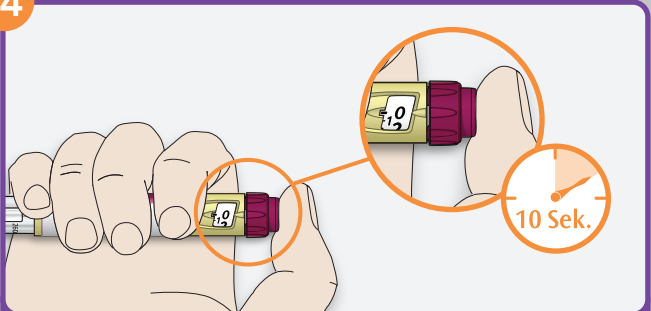


Injektionsknopf gedrückt halten. Wenn „0“ angezeigt wird, langsam bis 10 zählen.

15

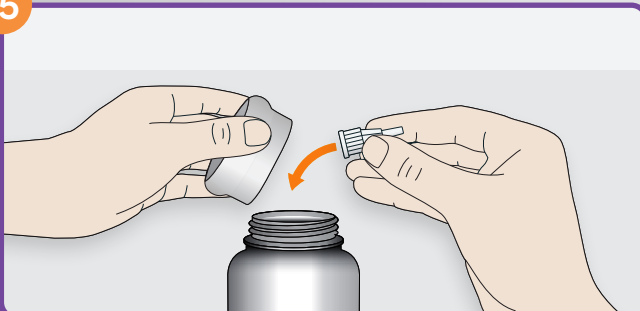

Äußere Nadelkappe auf Nadel setzen und vom Pen abdrehen. Nadel entsorgen.

16

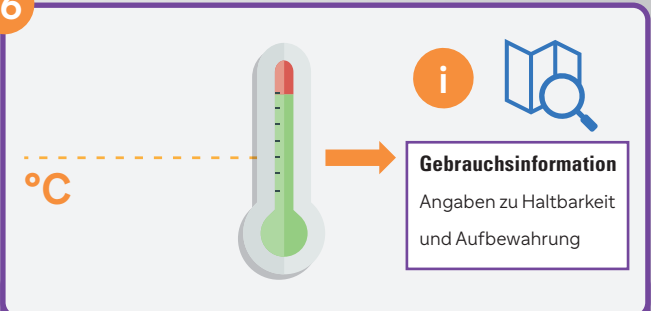

Das Mahlzeiteninsulin nach erstem Gebrauch bei Raumtemperatur aufbewahren: bitte prüfen Sie in der Gebrauchsinformation, ob Ihr Insulin unter 25 °C oder unter 30 °C gelagert werden soll.

Ihr ServiceCenter Diabetes

0800 52 52 010

(gebührenfrei aus dem
dt. Fest- und Mobilfunknetz)

E-Mail: medinfo.de@sanofi.com

Website: diabetes.sanofi.de

sanofi